

使用说明:MICRO DAP

MICRO DAP/DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液:



用于皮肤遭化学品喷溅的应急冲洗液

适用条件:

MICRO DAP为皮肤喷雾, 内含100ml的Diphoterine® (敌腐特灵) 溶液。敌腐特灵溶液可去除表面的化学物质, 阻止化学物质渗透, 通过充足的冲洗, 去除人体组织中的化学物质。本产品的容量适用于接触化学品后, 60秒内使用。

Diphoterine® (敌腐特灵) 溶液对氢氟酸及其衍生物作用有限, 对于此类喷溅, 我们建议使用Hexafluorine® (六氟灵) 溶液, 一种专门针对氢氟酸及其酸性介质中的氟化物的冲洗液。

MICRO DAP应放置在风险区附近, 以确保有效地使用。

使用规则:



MICRO DAP应作为第一选择在第一时间使用。但如果喷溅发生现场没有配备Diphoterine® (敌腐特灵) 溶液, 千万不要延迟冲洗, 用水冲洗, 尽管采用水冲洗会导致延误使用敌腐特灵溶液的时机而降低敌腐特灵的效果。

注: MICRO DAP 产品的功效来自Diphoterine® (敌腐特灵) 溶液中的活性成分, 其对化学品有作用。

使用方法: 在发生事故时, 建议用MICRO DAP包装中的全部溶液冲洗受污染部位。

延时冲洗时的使用方法: 接触化学品60秒后, 根据接触化学品的类型, 灼伤可能已经产生。此时冲洗创面, 仍可改善后续对创面的治疗。在此情况下, 我们建议继首次使用MICRO DAP冲洗创面后, 再使用Diphoterine® (敌腐特灵) 溶液对创面进行二次冲洗, 理想的冲洗时间相当于接触化学品时间的3至5倍。

安全注意事项:

1. 当携带MICRO DAP时可能会导致严重的撞击、挤压或摩擦, 建议使用加固外壳来保护MICRO DAP。任何小的冲击都有可能导致MICRO DAP的使用故障,
2. MICRO DAP的存放应避免高温, 避免阳光直射。也不建议将产品暴露在冷冻环境中, 因为液态产品会冻结而无法立即使用。产品解冻后恢复其性能。最佳使用温度为15~35°C之间。
3. 产品超过标签上的有效期后不建议使用。
4. MICRO DAP 产品须在标签注明的到期日或之前更换。
5. 应使用MICRO DAP持续冲洗皮肤, 如果喷雾没有覆盖全部受污染的皮肤或没有持续冲洗, 有可能会减轻疼痛感, 但无法彻底清除化学物质, 或不能阻止灼伤的发展。

MICRO DAP 产品的处置:

处置Diphoterine® (敌腐特灵) 溶液时无需采取特别措施, 然而, 我们建议您在丢弃MICRO DAP时遵守高压喷雾罐的处理指南。

不良影响:

MICRO DAP 中的 Diphoterine® (敌腐特灵) 溶液无刺激性、无毒性、不会引起过敏。

PREVOR
Moulin de Verville
www.prevor.com
95760 VALMONDOIS

Scientific studies, testimonials, toxicological data, product list and general recommendations are available on our website: www.prevor.com