

使用说明：壁挂式组合

LMPE.DAS和LMPEGF.DAS/DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液:

用于眼睛和皮肤被化学品喷溅的应急冲洗液。

感谢您购买我公司的 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 壁挂式组合及对我公司产品的信赖。

DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 壁挂式组合是什么？

- DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 壁挂式组合是专门用于化学喷溅的应急冲洗产品。
- 每套壁挂含有2瓶 500ml 的 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 洗眼液 (LPMD)，用于眼部冲洗；1瓶 200ml 的 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 小型皮肤冲洗液 MINI DAP，用于冲洗小面积的皮肤喷溅 (脸部或手臂)。
- 还含有 1瓶 AFTERWASH II® (等渗透压缓解眼露)，在使用 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗后，AFTERWASH II® (等渗透压缓解眼露) 可以快速恢复眼睛的生理平衡。

DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 壁挂式组合的安装与使用规则：

壁挂式组合应放在危险区附近，建议安装在实验室、生产区。

壁挂式组合必须放置在事故发生后，所有潜在使用者可在60秒钟内获取的位置。

为了确保在喷溅事故后立即冲洗，建议配备个人无菌洗眼液 (SIEW)，使用者可以直接随身携带，事故发生后10秒内就可以开始首次紧急冲洗。

最高效的使用方法：

为达到最佳使用效果，我们建议事故发生后60秒钟内使用：

- LPMD洗眼液用于冲洗眼部喷溅；建议一次使用完一个包装。

MINI DAP小型皮肤冲洗液用于冲洗皮肤喷溅 (相当于一个面部的面积)；建议一次使用完一个包装。大面积皮肤喷溅的情况，我们建议使用 5L 装便携式独立冲洗液 (DAP)。DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗液的功效来自冲洗液的活性成分。

- AFTERWASH II® (等渗透压缓解眼露) 可以快速恢复眼睛的生理平衡，缓解眼睛因化学喷溅引起的不适感。

● 一般性使用建议

壁挂式组合应作为第一选择在第一时间使用。如果先用水冲洗会延误使用 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗的时间，从而降低 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 的冲洗效果。如果在事故发生区没有

DIPHOTERINE® (敌腐特灵)，不要延迟，用水冲洗。

产品在超过包装上的有效期后不要再使用。

应遵循普利沃使用规则：持续冲洗，一次使用完一个包装。

● DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 的有效范围和已知的局限：

DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 能够阻止化学品渗透和所有化学灼伤的发展，但因其对氢氟酸及其衍生物作用有限，针对此类喷溅我们建议使用 HEXAFLUORINE® (六氟灵) 溶液，一种专门针对氢氟酸及酸性介质中的氟化物的冲洗液。

● 如果灼伤已经产生或 60 秒后才采取急救措施该怎么办？

超过 60 秒后，根据化学产品的类型，灼伤可能已经产生。即便如此，使用 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗被喷溅的部位包括灼伤处会改善后续治疗。在延误冲洗的情况下 (超过60秒) 使用 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 也有一定的效果。这种情况下，我们建议：对于眼部，继首次冲洗后，用 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 再连续冲洗5分钟；对于皮肤，持续时间为接触化学品时间的3-5倍。

● 保养与维护

MINI 产品应避免高温，避免阳光直射。

也不建议将产品暴露在冷冻环境中，液态产品会冻结，无法立即使用。产品解冻后恢复其性能。最佳使用温度为 15~35° C 之间。

产品超过标签上的有效期后应更换。

● 毒性分析

DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液无刺激性，无毒性，不会引起过敏反应



Scientific studies, testimonials, toxicological data, list of tested products and the general conditions can be found on our website www.prevor.com

Laboratoire Prevor, www.prevor.com
Moulin de Verville F-95760 VALMONDOIS

CE 0459



PREVOR
ANTICIPATE AND SAVE
Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management