

使用说明：LPMD

LPMD /DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液:

用于眼睛被化学品喷溅的应急清洗液。

感谢您购买我公司的 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 便携式洗眼液及对我公司产品的信赖。

LPMD 是什么 ?

LPMD是专门针对眼睛被化学品喷溅的应急洗眼液，每瓶洗眼液含有 500ml 的 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液。应在事故发生后 60秒内使用。

LPMD 的安装与使用规则：

LPMD内盛500ml的DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液，可在事故发生后60秒内用于眼部冲洗。

LPMD洗眼液应放置在风险区附近，建议安装在实验室，生产区。

最高效的使用方法：

LPMD是特别针对眼睛的应急冲洗液。

其功效来自 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液的活性成分。

事故中，建议一次性使用完一个包装（清洗一只眼睛）。

• 一般性使用建议

LPMD应作为第一选择在第一时间使用。如果先用水冲洗会延误使用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗的时间，因此会降低DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 的冲洗效果。如果在事故发生区没有DIPHOTERINE® (敌腐特灵)，不要延迟冲洗，要尽快用水冲洗。

超过包装上的日期后不要再使用。

LPMD应作为眼部冲洗液使用，而不是用来浸泡眼睛。

应遵循普利沃使用规则，使用LPMD持续冲洗眼部，即使疼痛减轻。

• DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液的有效范围和已知的局限：

DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 能够阻止化学品渗透和所有化学灼伤的发展，但因其对氢氟酸及其衍生物的作用有限，针对此类喷溅我们建议使用 HEXAFLUORINE® (六氟灵) 溶液，一种专门针对氢氟酸及酸性介质中的氟化物的冲洗液。



• 如果灼伤已经产生或 60 秒后才开始急救措施该怎么办？

超过 60 秒后，根据化学产品的类型，灼伤可能已经产生。即便如此，使用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗被喷溅的部位包括灼伤处会改善后续治疗。在延误冲洗的情况下使用 DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗液也有一定的效果。这种情况下，我们建议继首次冲洗后再使用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液继续冲洗5 分钟。

• 保养与维护

LPMD产品应放在干燥的地方，避免强热源。也不建议将产品暴露在冷冻环境中，液态产品会冻结，不能立即使用；产品解冻后恢复其性能。最佳使用温度为 15—35°C 之间。

超过标签上的日期后应更换。

• 毒性分析

DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 溶液无刺激性，无毒性，不会引起过敏反应。

Scientific studies, testimonials, toxicological data, list of tested products and the general conditions can be found on our website www.prevor.com

Laboratoire Previor, www.prevor.com
Moulin de Verville F-95760 VALMONDOIS

CE 0459



PREVOR
ANTICIPATE AND SAVE
Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management